



**GIRAFFE
BOTTLE**

HIDRATACIÓN CON UN PROPÓSITO™

**SISTEMA PARA
BEBER MANOS LIBRE**

GUÍA DE USO Y CUIDADO

...PRESENTANDO DEL CUELLO 'TOWER XL'



...HACIENDO LA
HIDRATACIÓN
MÁS ACCESIBLE

Cuidado de los Componentes

Equipo para Botellas de Tritan™ Plástico y Acero Inoxidable





NO GUARDAR BOTELLAS EN LA REFRIGERADORA/ CONGELADORA

Temperatura Máxima de Funcionamiento: 185°F / 85°C




APTO PARA LAVAVAJILLAS

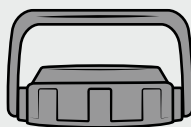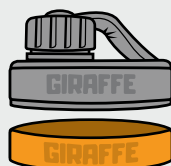

NO ES APTA PARA LAVAVAJILLAS



LAVADOS A MANO

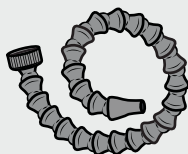


Evite sumergir el cuello modular durante la limpieza: limpie la superficie exterior

Tubo de Tomar + Válvula de Mordida

La válvula de mordida debe ser retirada para limpiar y **NO** debe ser atravesada con el cepillo.



USAR EL CEPILLO INCLUIDO

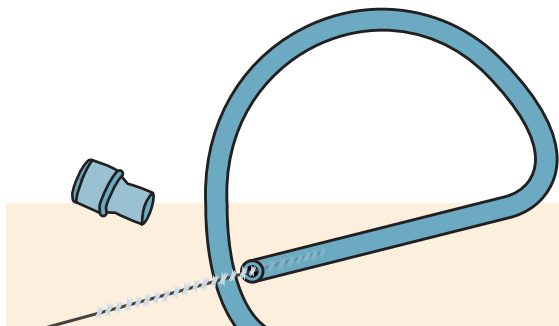



Si es sensible al sabor del tubo para beber suministrado (después del lavado), solicite un tubo alternativo.

Ensamblado del Cuello 'Tower'

El ensamblado esta diseñado para separarse con un chasquido para ajustar el tamaño a lo deseado.



! Si le preocupa que la válvula de mordida represente un peligro para la seguridad, retírelo del tubo para beber durante el uso.

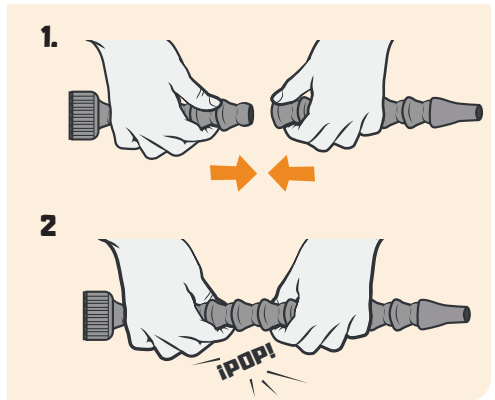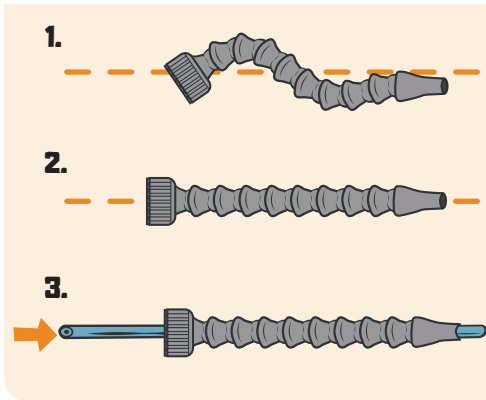

HORARIO DE REEMPLAZO

TUBO DE TOMARCADA MES

CEPILLO PARA LIMPIA . . . CADA 3 MESES

VÁLVULA DE MORDIDACADA MES

ENSEMBLADO DEL CUELLO CADA 3 MESES


Reemplace periódicamente las piezas integrales del sistema Giraffe Bottle 'Tower XL' para mantener una higiene y funcionamiento óptimos.



Uso Recomendado

¿Qué Bebidas Puede Disfrutar?

Agua o líquido **fino y no viscoso** es más recomendable para Giraffe Bottle. Beber disfrutar otras bebidas, retire la válvula de mordida del tubo de tomar.

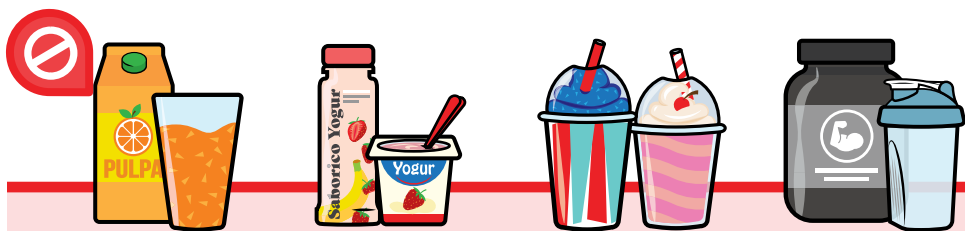


! La válvula de mordida puede obstruirse si se usa con bebidas más espesas.

Controlar el Flujo

Presionar la válvula de mordida entre dos superficies (movimiento de mordida) permite que se abra. Combinado con la succión, puedes controlar el flujo de tu bebida y saber que no se derramará si no la usas.

Con la válvula de mordida colocada, su bebida no volverá a la botella después de tomar un sorbo. Si la válvula de mordida no es necesaria para su aplicación, se puede quitar fácilmente.

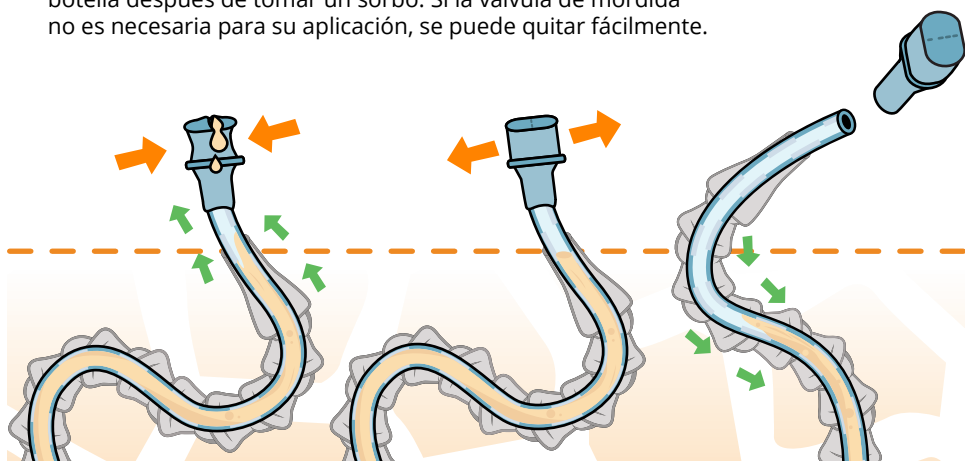

! Este sistema está recomendado para personas con buen control de las funciones bucales

EL SISTEMA 'TOWER XL'



LONGITUDES DE ENSAMBLAJE DEL CUELLOS

15", 25", 30", 36"
(38 cm, 64 cm, 76 cm, 91 cm)

TIPO DE TUBO PARA BEBER

Grande, Rodeado de Plástico Modular
5/32" (4mm) Diámetro Interno

TIPO DE CONTROL DE LÍQUIDOS



Válvula de Mordida
*Extraíble del Tubo

OPCIONES PARA PORTAVASOS

Portavasos de Aluminio

ESTE SISTEMA ES MEJOR PARA:

Individuos con función pulmonar y oral completa, pero poca o ninguna movilidad en la parte superior del cuerpo.

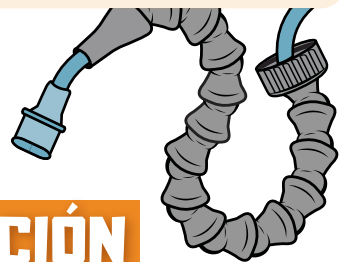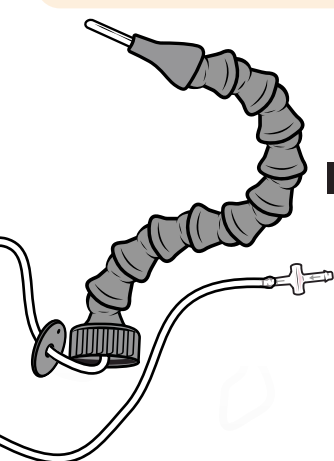

NIVELES DE

HIDRATACIÓN

Giraffe Bottle ofrece tres opciones únicas para la hidratación con las manos libres. Cada uno se adapta a diferentes necesidades y propósitos, teniendo en cuenta las experiencias de las personas.

Nuestros sistemas son compatibles con todas las botellas; ¡Explóralos todos y descubre cuál se adapta mejor a tus necesidades!



FAQ'S

¿Tiene preguntas sobre su sistema actual?

WWW.GIRAFFEBOTTLE.COM/PRODUCT-FAQ

CENTO DE APRENDIZAJE

Visite el Centro de Aprendizaje en GiraffeBottle.com para explorar la hidratación manos libres y las preguntas frecuentes sobre nuestros productos. Comuníquese con Giraffe Bottle si tiene alguna pregunta, comentario o sugerencia.



Accesorios de Giraffe Bottle



Modelos de Giraffe Bottle

Plástico Tritan™: #504111
Negra: #504211
Naranja: #504212
Lt. Ed. SGN Botella: #504221

Tubo de Tomar + Válvula de Mordida

Para Cuello de 15": #504072
Para Cuello de 25": #504074
Para Cuello de 30": #504075
Para Cuello de 36": #504076

Kit de Inicio 'Tower XL'

Cuello de 15": #505162
Cuello de 25": #505164
Cuello de 30": #505165
Cuello de 36": #505166

Portavasos con Abrazadera

Se fija a sillas de ruedas y otros tubos redondos.

#500311

Portavasos para Cojines

Deslícese debajo de colchones, cojines y otras superficies.

#500322

Base con Peso para el Escritorio

Asegúrese que su botella no se voltee al ponerla en esta base ponderada.

#500323

Portavasos de Montaje en Riel

Se fija a sillas eléctricas con rieles para accesorios (incluye Quantum™, Permobil™).

#500314

Más Accesorios Online

Para tubos para beber alternativos (debido a la sensibilidad al sabor), accesorios y otras piezas de repuesto, explore en línea o comuníquese con Giraffe Bottle.

WWW.GIRAFFEBOTTLE.COM

SE MUESTRAN: CEPILLOS DE LIMPIEZA PARA BOTELLA + TUBO, VÁLVULA DE MORDIDA



GIRAFFE
BOTTLE

es una división de:



SALES@GIRAFFEBOTTLE.COM

1-630-922-5004

Producto diseñado y ensamblado en los EEUU. Fabricado con componentes americanos y globales. La información y las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Permobil, Quantum y todas las demás marcas que puedan haberse mencionado, ya sea directa o indirectamente, son marcas comerciales de otra persona y no son propiedad de Oak Hill Brands. Giraffe Bottle es una marca registrada de Oak Hill Brands Corp.