



GIRAFFE
BOTTLE

L'IDRATAZIONE
SENZA MANI

MANUTENZIONE E GUIDA ALL'USO



... RENDIAMO
L'ACCESSIBILITÀ
PIÙ ACCESSIBILE

Kit Borraccia per L'idratazione Senza Mani

BOTTIGLIA IN PLASTICA TRITAN™

Bottiglia in Tritan da 700ml/24oz conforme alle norme europea per i materiali a contatto con gli alimenti, plastica priva di BPA

COPERCHIO A BECCUCCIO E TAPPO

Polipropilene con guarnizione in silicone, conforme alla normativa europea per i materiali plastici a contatto con gli alimenti

COLLO MODULARE

Materiale in copolimero acetalico conforme alle normative UE sul contatto con gli alimenti e adattatore per il collo da usare con il coperchio con beccuccio

CANNULA PER BERE E VALVOLA DI RITEGNO

Conforme alla normativa europea per i materiali a contatto con gli alimenti, cannula priva di BPA e ftalati e valvola di ritegno in polipropilene con guarnizione in silicone

SCOVOLINO PER LA PULIZIA DELLA CANNULA

Acciaio inossidabile con spazzole in nylon conforme alle norme UE



Temperatura operativa massima: 85°C / 185°F

Manutenzione dei Componenti

Corpo della Borraccia in plastica Tritan™




LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE

Coperchio a Beccuccio, Le parti in silicone, + Tappo



LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE

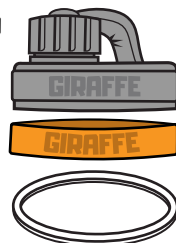

! Le parti in silicone dovrebbero essere rimosse dal coperchio, prima della pulizia in lavastoviglie

Per un'igiene e una funzionalità ottimali, tutti i componenti della bottiglia devono essere puliti prima di ogni utilizzo.

BORRACCIA IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Borraccia in acciaio inossidabile 304 per uso alimentare, con isolamento sottovuoto, da 700ml/24oz

COPERCHIO A BECCUCCIO E TAPPO

Polipropilene con guarnizione in silicone, conforme alla normativa europea per i materiali plastici a contatto con gli alimenti

COPERCHIO ISOLANTE CON MANIGLIA

Coperchio extra per una temperatura ottimale

COLLO MODULARE

Materiale in copolimero acetalico conforme alle normative UE sul contatto con gli alimenti e adattatore per il collo da usare con il coperchio con beccuccio

CANNULA PER BERE E VALVOLA DI RITEGNO

Conforme alla normativa europea per i materiali a contatto con gli alimenti, tubo privo di BPA e ftalati e valvola di ritegno in polipropilene, con guarnizione in silicone

SPAZZOLINI PER LA PULIZIA DELLA CANNULA E DELLA BOTTIGLIA

Scovolino per la cannula in acciaio inossidabile e nylon conforme alle norme EU, e spazzolino per la bottiglia da 30cm (12") in silicone nero

Recommended Max Temperature: 185°F / 85°C

Mantiene il contenuto CALDO 10 ORE / FREDDO 18+ ORE



Bottiglia in Acciaio Inossidabile



NON ADATTA ALLA LAVASTOVIGLIE




PER LA PULIZIA UTILIZZARE LO SCOVOLINO IN DOTAZIONE

Coperchio a Beccuccio, Le parti in silicone, + Tappo




LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE

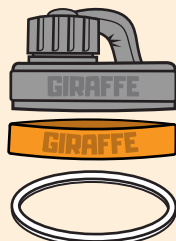

Le parti in silicone dovrebbero essere rimosse dal coperchio, prima della pulizia in lavastoviglie

Coperchio Isolante per il Trasporto

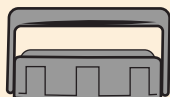

LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE


Accessori per L'idratazione Senza Mani

I componenti del sistema Giraffe Bottle per bere senza mani devono essere smontati prima della pulizia. Le parti che compongono un sistema completo sono:

- COLLO MODULARE CON ADATTATORE PER COPERCHIO
- COPERCHIO CON BECCUCCIO FILETTATO CON GUARNIZIONE
- CANNULA PER BERE
- VALVOLA DI RITEGNO



ALCUNE PARTI
NON ADATTE ALLA
LAVASTOVIGLIE

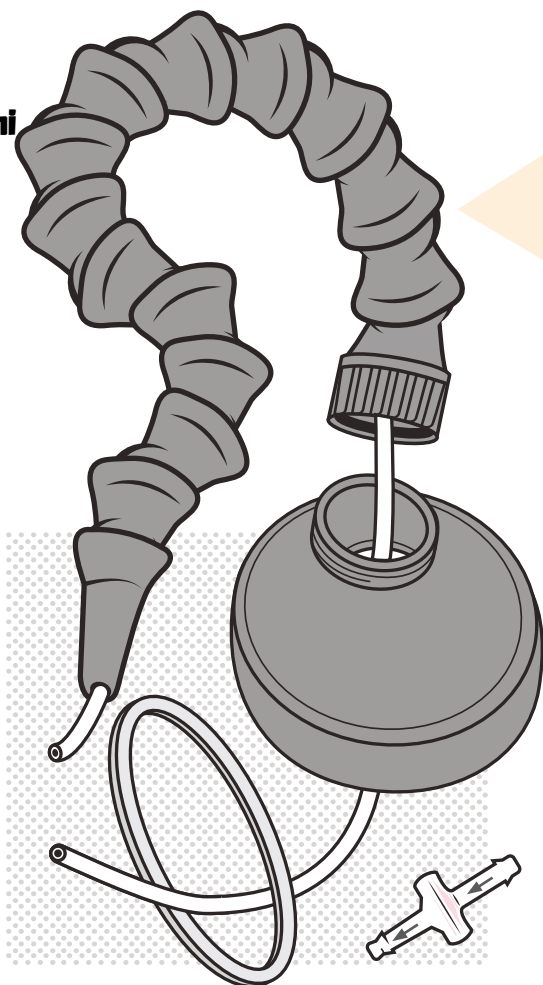

Cannula per bere + Valvola di ritegno

La cannula per bere e la valvola di ritegno dovrebbero essere lavati a mano. Per pulire la cannula per l'idratazione, utilizzare l'apposito scovolino in dotazione.


PER LA PULIZIA
UTILIZZARE LO SCOVOLINO
IN DOTAZIONE




NON ADATTA ALLA
LAVASTOVIGLIE



! La valvola di ritegno deve essere rimossa per **NON** essere forata dallo scovolino per la pulizia della cannula.

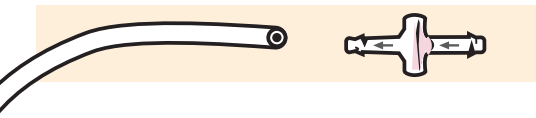

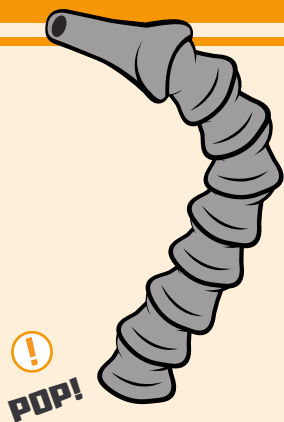


Montaggio del Collo



NON ADATTA ALLA LAVASTOVIGLIE



La struttura è progettata per scomporsi a incastro, in modo da regolare la lunghezza del collo secondo necessità.

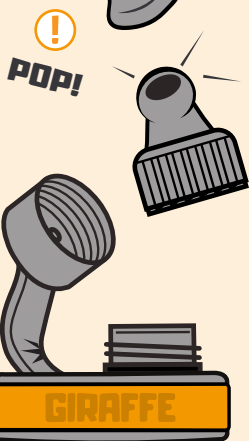

Coperchio con Beccuccio Filettato



LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE




Le parti in silicone dovrebbero essere rimosse dal coperchio, prima della pulizia in lavastoviglie.

Cannula per bere + Montaggio del collo

Raddrizzare il montaggio del collo, per mettere facilmente la cannula per bere all'interno.



NON ADATTA ALLA LAVASTOVIGLIE

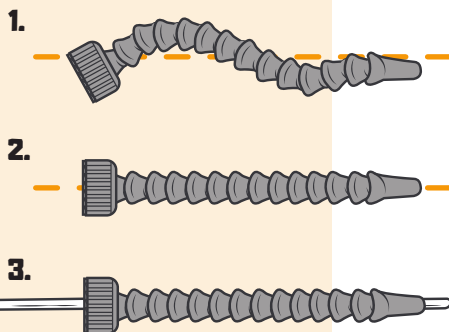

Domande Frequenti

Cos'è meglio: collo lungo o collo corto?

La regola generale è quella di mantenere il collo alla lunghezza minima consentita dall'utilizzo. Più corto è il collo, minore sarà l'aspirazione necessaria per caricare la cannula e bere. Inoltre col collo corto le possibilità che si afflosci saranno ridotte al minimo, impedendo alla struttura di urtare eventuali ostacoli.

Quando devo pulire il sistema?

Si prega di pulire prima di ogni utilizzo.

I componenti del collo flessibile sembrano difficili da pulire. Come li pulisco?

Poiché il collo flessibile ospita la cannula per bere e non viene a contatto con liquidi, non è necessario pulirlo a fondo. È sufficiente pulire le estremità del con un panno umido e lasciare asciugare.

Non è consigliabile immergere il collo flessibile o metterlo in ammollo al fine di pulirlo. Richiederebbe un lungo periodo di asciugatura.

Quali tipi di liquidi posso essere inseriti nel sistema Giraffe Bottle?

I liquidi non densi e viscosi sono i più adatti. L'acqua è il liquido ideale.

Con la valvola di ritegno, non utilizzare succhi ad alto contenuto di zucchero, bevande gassate o bevande con polpa. Questi tipi di liquidi rimangono attaccati e danneggiano la valvola di ritegno. Se vuoi gustare questi tipi di bevande, per bere dovrai rimuovere la valvola di ritegno dall'estremità della cannula.

Posso mettere le bottiglie o i componenti nella lavastoviglie?

Alcuni componenti sono lavabili in lavastoviglie, come la bottiglia di plastica e i coperchi. Tuttavia, la maggior parte dei componenti dovrà essere lavata a mano.

Che cos'è una "valvola di ritegno", cosa fa, e come me la procuro?

Quando acquisti un nuovo sistema Giraffe Bottle per bere senza mani, la valvola di ritegno è inclusa, preinserita, alla base della cannula per bere.

La valvola di ritegno trattiene i liquidi nella cannula per bere, limitandone il flusso verso il basso, nella borraccia. Con un uso regolare, si consiglia di cambiare la valvola di ritegno una volta al mese.

Vorrei tenere una bottiglia di riserva nel frigo/congelatore. È possibile farlo?

Avere una bottiglia in più, di riserva, è sempre un'ottima idea. Tuttavia, non suggeriamo di conservare la bottiglia di scorta nel congelatore. L'espansione dell'acqua può causare gravi danni alla bottiglia.

Soprattutto, non congelare mai una bottiglia di riserva con la cannula per bere o la valvola di ritegno in immersione.

Come posso avviare il flusso del liquido senza doverlo aspirare tutto?

Puoi caricare la cannucchia con il liquido aiutandoti con una di una pompetta aspirante. Questo sarà di grande aiuto per gli utenti con funzionalità polmonare limitata, che hanno difficoltà a iniziare ad aspirare il liquido da soli.

Posso mettere bevande calde nella Giraffe Bottle? E le bevande ghiacciate?

Mentre la nostra bottiglia di plastica non è consigliata per le bevande calde, la nostra bottiglia in acciaio inossidabile è invece la scelta ideale per bevande calde. La bottiglia in acciaio inossidabile manterrà calde le bevande calde fino a 10 ore, utilizzando il coperchio isolante in dotazione.

Sia le nostre bottiglie in plastica che quelle in acciaio inossidabile sono invece perfette per le bevande fredde. La bottiglia termica in acciaio inossidabile mantiene le bevande fredde per 18 ore o più, se ghiacciate.



Assicurati che il contenuto del liquido nella bottiglia non superi mai la punta della cannucchia.

Oh no, il sistema perde! E ora come facciamo?

La causa più comune è dovuta al posizionamento della bottiglia, che probabilmente è stata installata troppo in alto. Assicurati che il contenuto del liquido nella bottiglia non superi mai la punta della cannucchia. Quando la punta della cannucchia è più bassa del livello del liquido della bottiglia, crea un effetto sifone che risucchia i liquidi verso l'alto e verso l'esterno.

Posiziona la punta della cannucchia insù, e sostituire periodicamente le parti del sistema per mantenere un'igiene e una funzionalità ottimali della borraccia.

Posiziona la bottiglia più in basso e sarai a posto!

Ci sono bottiglie o componenti adatti al microonde?

La bottiglia e i componenti **NON** sono adatti al microonde.

Ho una domanda per la quale non è presente una risposta.

Siamo tutt'orecchi! Contattaci per qualsiasi domanda, commento e feedback.

Chiamaci, inviaci un'e-mail o mandaci un messaggio sui social media: saremo felici di aiutarti!

Programma per la Sostituzione

CANNULA PER BEREMENSILMENTE

VALVOLA DI RITEGNOMENSILMENTE

SCOVOLINO PER LA PULIZIA . . OGNI 3 MESI

COLLO MODULAREOGNI 8 MESI

Si consiglia di sostituire periodicamente le parti del sistema Giraffe Bottle™ per bere senza mani, per mantenere un'igiene e una funzionalità ottimali della borraccia.

Accessori per Giraffe Bottle



Stili di Giraffe Bottle

Il corpo della Giraffe Bottle è disponibile in diverse dimensioni, materiali e colori. Qualunque stile tu voglia dare al tuo drink, abbiamo la borraccia che fa per te.

Cannula per bere + Valvola di ritegno

Tieni sotto controllo i tuoi liquidi, con la nostra accoppiata cannula più valvola.



Pompetta Aspirante

Carica i liquidi nella cannula con l'aiuto della nostra praticissima pompetta aspirante!



Supporti + Porta bottiglie

I nostri supporti possono essere montati su sedie a rotelle, carrozzine elettriche o altre strutture comuni, come i letti degli ospedali.



Borraccia + Scovolino

Gli appositi spazzolini in dotazione rendono la pulizia una passeggiata! Aggiungi un po' di acqua e sapone, e il gioco è fatto!



Base da tavolo ponderata



Evita che la borraccia si rovesci piazzandola saldamente dentro una base per ripiani.

Altri Accessori Online

WWW.GIRAFFEBOTTLE.COM



GIRAFFE
BOTTLE

a division of:

Oak Hill
BRANDS CORP

Prodotto progettato negli Stati Uniti. Realizzato con componenti nazionali ed esteri. Informazioni e specifiche soggette a modifiche, in qualsiasi momento e senza preavviso. Giraffe Bottle è un marchio registrato di Oak Hill Brands Corp.